


სწრაფი ტესტის ჩატარების ხელოვნება


- 1 მიკროპიპეტით ვიღებთ 10 მკლ შრატს, პლაზმას ან მთლიან სისხლს, ვანვეთებთ ორმოში "S"
- 2 ვამატებთ 4 წვეთ ბუფერს 90° კუთხით
- 3 ველოდებით შედეგს ≈ 5-20 წუთის განმავლობაში

ტესტის შედეგების ინტერპრეტაცია

ტესტს აქვს 2 ზონა „C“ კონტროლი და „T“ ტესტი უარყოფითი შედეგი დადებითი შედეგი


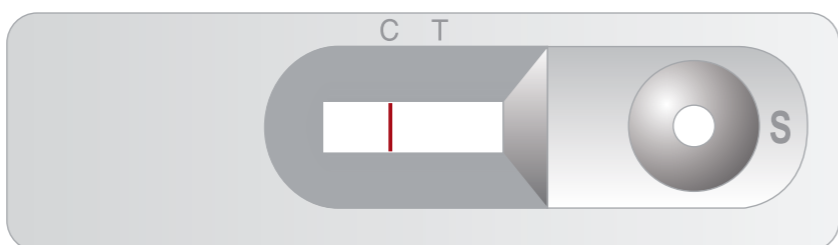


ერთი ხაზი (კონტროლის ზონაზე) ნიშნავს უარყოფით შედეგს

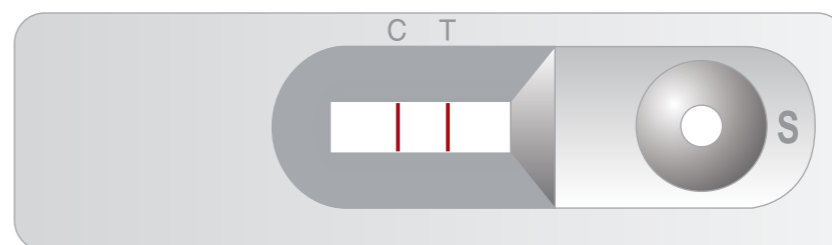

ორი ხაზი (კონტროლის და ტესტის ზონებზე) ნიშნავს დადებით შედეგს


ტესტი არასწორადაა ჩატარებული

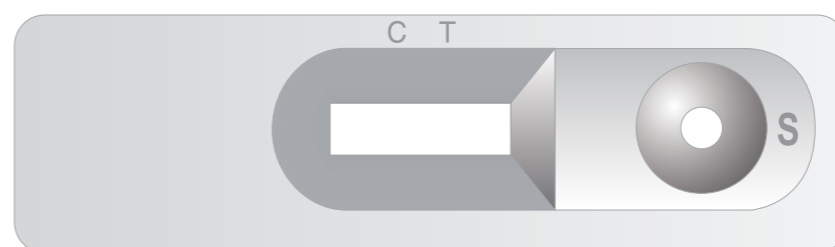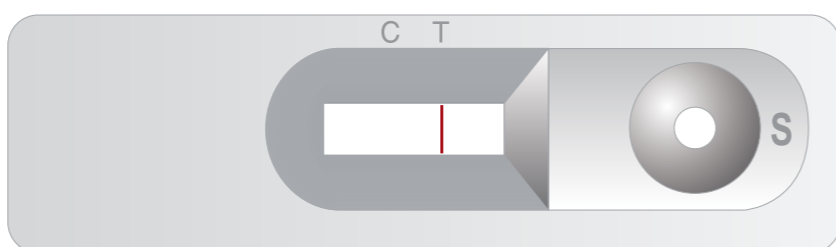

ხაზის არარსებობა კონტროლის ზონაზე. საჭიროებს ხელახალ ტესტირებას!

როგორ დავიცვათ თავი სისხლის გზით გადასდები ინფექციებისაგან

- სიფრთხილით მოვეკიდოთ ბასრ ინსტრუმენტებს
 - ნემსი ან ბასრი ინსტრუმენტები გამოყენებისთანავე მოვათავსოთ სპეციალურ კონტეინერში, რომელშიც ნახშიარი ნემსი თავსახურის წამოცმის გარეშე უნდა მოთავსდეს.
 - მაქსიმალურად გამოვიყენოთ უსაფრთხო ნემსები და სისტემები
- სისხლთან ნებისმიერი შეხებისას გამოვიყენოთ ხელთათმანი
- პაციენტთან კონტაქტის შემდეგ გულდასმით დავიბანოთ ხელები (თუნდაც ხელთათმანის ხმარების შემთხვევაში)
- თუ არსებობს სისხლის შემხეფების რისკი, გამოვიყენოთ სათვალე ან ნიღაბი

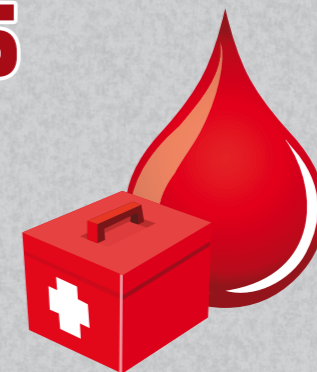

ნების რეგულაციის ან კანის/ღორწოვანი გარსების სისხლით დასვრის შემთხვევაში დაუკავშირდით სპეციალისტს ექსპოზიციის შემდგომი პროფილაქტიკის შესახებ კონსულტაციისთვის